



# Zahnschmuck zum Einsetzen oder zum Aufkleben

Immer mehr Menschen betonen ihr Lächeln mit Zahnschmuck und setzen einen besonderen Akzent durch Zirkonia, Schmucksteine oder Goldmotive zum Aufkleben. Auch für das Einsetzen in Zahnersatz bieten wir eine Vielzahl von Möglichkeiten bis hin zum Brillanten.





Bild: DJ 80

Hier Stückzahl eintragen	Artikel Nr.	Bild 1:1	Artikelbezeichnung und Größe in mm	Preis in € pro Stück
	Z-1.0		Zirkonia (synthetischer Diamant) / weiß / ø 1,0	9,90
	Z-1.5		Zirkonia (synthetischer Diamant) / weiß / ø 1,5	15,00
	Z-2.0		Zirkonia (synthetischer Diamant) / weiß / ø 2,0	17,00
	Z-2.5		Zirkonia (synthetischer Diamant) / weiß / ø 2,5	19,00
	ZA-1.5		Zirkonia (synthetischer Diamant) / amethystfarben / ø 1,5	14,00
	ZA-2.5		Zirkonia (synthetischer Diamant) / amethystfarben / ø 2,5	18,00
	EA-2.0		Echter Amethyst / ø 2,0	15,00
	ES-2.0		Echter Smaragd / grün / ø 2,0	19,00
	ER-2.0		Echter Rubin / rot / ø 2,0	18,00
	B-1.75		Brillant / 0,02 ct / weiß / ø 1,75 / WSI / Vollschliff	49,00
	B-2.0		Brillant / 0,03 ct / weiß / ø 2,0 / WSI / Vollschliff	69,00
	B-2.2		Brillant / 0,04 ct / weiß / ø 2,2 / WSI / Vollschliff	79,00

## Verarbeitungshinweise für Diamanten, Edelsteine und Zirkonia zum Einsetzen

- Zahnoberfläche mit fluoridfreier Polierpaste reinigen und trocknen.
- Fixpunkt mit entsprechendem Bohrer bis zur gewünschten Tiefe vorbohren.
- Bei Schmelz die Vertiefung anätzen, spülen und trocknen. (Arbeitsgang entfällt bei Zahnersatz).
- Bonding oder bei Keramik Silan mit einem Pinsel in die Vertiefung bringen und aushärten.
- Fließfähiges, lighthärtendes Composite in die vorbereitete Vertiefung einbringen und den Stein positionieren. Achten Sie darauf, dass die Facette des Steines vom Composite umschlossen wird, da sonst kein ausreichender mechanischer Halt gewährleistet ist.
- Überschüsse vor dem Aushärten entfernen und Composite aushärten. Niemals über Diamanten und Zirkonia polieren oder finieren.



Hier Stückzahl eintragen	Artikel Nr.	Bild 1:1	Artikelbezeichnung und Größe in mm	Preis in € pro Stück
 Schliffart 	DJ 10/2		Swarovski Schmuckstein zum Aufkleben / weiß / ø 1,5 / Rosenschliff	<del>14,00</del>
	DJ 11/2		Swarovski Schmuckstein zum Aufkleben / rainbow / ø 1,5 / Rosenschliff	<del>14,00</del>
	DJ 10		Swarovski Schmuckstein zum Aufkleben / weiß / ø 1,8 / Rosenschliff	<del>14,00</del>
	DJ 11		Swarovski Schmuckstein zum Aufkleben / rainbow / ø 1,8 / Rosenschliff	<del>14,00</del>
	DJ 12		Swarovski Schmuckstein zum Aufkleben / hellblau / ø 1,8 / Rosenschliff	<del>14,00</del>
	DJ 10/1		Swarovski Schmuckstein zum Aufkleben / weiß / ø 2,0 / Rosenschliff	<del>14,00</del>
	DJ 11/1		Swarovski Schmuckstein zum Aufkleben / rainbow / ø 2,0 / Rosenschliff	<del>14,00</del>
	DJ 12/1		Swarovski Schmuckstein zum Aufkleben / hellblau / ø 2,0 / Rosenschliff	<del>14,00</del>
	TW 98		Applikationshilfen - 20 Klebesticks zum Platzieren von Zahnschmuck	<del>7,70</del>
 Schliffart 	DJ 60/2		Zirkonia (synthetischer Diamant) / Kreis weiß / ø 1,5 / Brillant-Rosenschliff	<del>22,00</del>
	DJ 60/1		Zirkonia (synthetischer Diamant) / Kreis weiß / ø 1,8 / Brillant-Rosenschliff	<del>22,00</del>
	DJ 60		Zirkonia (synthetischer Diamant) / Kreis weiß / ø 2,0 / Brillant-Rosenschliff	<del>22,00</del>
	DJ 80		Zirkonia (synthetischer Diamant) / Tropfen weiß / Brillant-Facettschliff / 2,1x3,7	<del>22,00</del>

Die Größen der Schmucksteine sind Herstellerangaben und können 0,1 mm nach oben oder unten schwanken.

## Verarbeitungshinweise für Schmucksteine und Goldmotive zum Aufkleben

- Zahnoberfläche mit fluoridfreier Polierpaste reinigen und trocknen.
- Fixpunkt ausreichend anätzen (bei Keramik mit Diamantschleifer feiner Körnung leicht anrauen) spülen und trocknen.
- Bonding, bei Keramik auch Silan, auf die angeätzte bzw. angeraute Fläche auftragen und aushärten.
- Für den folgenden Arbeitsvorgang sollte unbedingt fließfähiges, lighthärtendes oder dualhärtendes Composite benutzt werden.
- Ausreichend Composite auf die vorbereitete Zahnoberfläche auftragen. Klebefläche des Zahnschmucks ebenfalls mit Composite benetzen.
- Zahnschmuck auf dem Zahn positionieren und ausrichten. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Zahnwölbung mit Composite ausgeglichen wurde und der Zahnschmuck satt aufliegt.
- Eventuelle Überschüsse durch Überportionierung vor dem Aushärten entfernen und anschließend das Composite von allen Seiten gut aushärten.



**Achtung:** Den Zahnschmuck vor der Verarbeitung in 70 % Alkohol reinigen und entfetten. Nie über Schmucksteine und Goldmotive mit Stein polieren oder finieren. Bei Verwendung eines Metallprimers kann man die Haftung um 50 % erhöhen. Den Zahnschmuck nicht ätzen oder mit den Fingern berühren.

## Polierer

Köpfe 1:1

- verpackt zu 6 Stück -

Bestell-Nummer	0308.6	0306.6	0305.6	0358.6	0356.6	0355.6
Anzahl der Packungen						
Preis pro Packung in €	21,90			24,10		

**NEU**



Diamantimpregnierte Hochleistungspolierer für Zirkonoxid, Keramik und alle harten Composite

Absender (Praxisstempel):

Unterschrift:

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, wir liefern immer **versandkostenfrei** zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Pro Auftrag berechnen wir eine geringe Spesenpauschale von 3,75 €, alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

☎ 0800 - 5 23 57 63 (gebührenfrei) ☎ 0180 - 5 23 57 62 (0,14 €/Min) 30 Tage Rückgaberecht, gültig ab 01.03.2017!